

フィンガーグリップ取扱説明


◇ アクトヒブ フィンガーグリップの特徴



*このフィンガーグリップはアクトヒブシリンジ専用です
ワクチンカラーである若竹色にしました

- ・手技での取付性、注入時の指かかり性を考慮した大きめサイズ
- ・注入時の指かかり性をより担保するリブ（波状の突起）の配置
- ・シリンジを横置きした時に安定する形状（四角形）


フランジにフィンガーグリップを装着することで、薬液の吸引や接種時の指のすべりを改善することができます

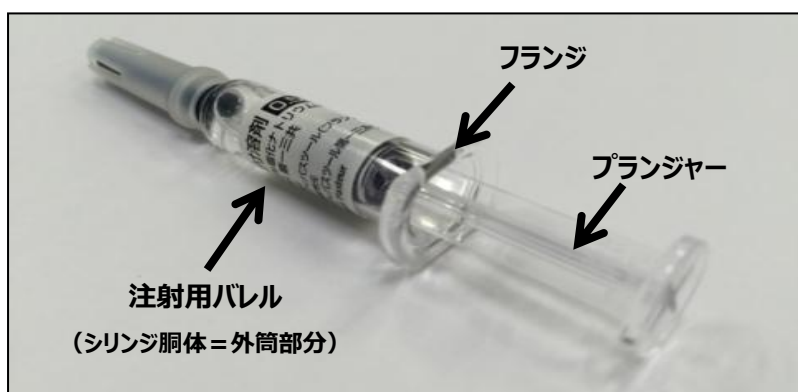

◇ フィンガーグリップの使用方法

【準備するもの：アクトヒブシリンジおよびフィンガーグリップ】

- ① アクトヒブのシリンジとフィンガーグリップを用意します。
- ② プランジャーの方にフィンガーグリップの表面がくるように装着します。

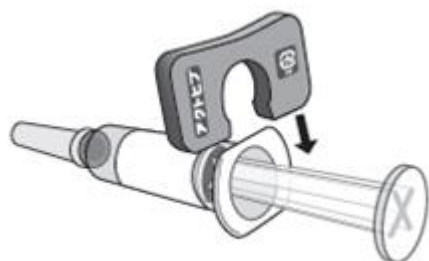

カチッと音がするまで装着してください

- ③ 本品使用後は、使い回しせず破棄してください。

*フィンガーグリップの詳細説明およびご用命は第一三共(株)およびジャパンワクチン(株) MR ならびに
お客様相談窓口までお問い合わせください